

感染性医療廃棄物の圧縮機能付き収納容器

段ボール容器用  
ホルダー

# ゴミヘル

特許取得済 第6172206



この量のゴミが・・・



ペダルを踏むだけで・・・



圧縮されて  
この量に!!

**およそ30% 収納力アップ!**<sup>\*1</sup>

経費削減!  
踏むだけ簡単!  
ゴミには一切触れません!

■製造元

**株式会社 笹倉溶接工業**

〒620-0856 京都府福知山市土師宮町2丁目131番地  
TEL.0773-27-7301 FAX.0773-27-7302  
e-mail sasayou@kisnet.ne.jp

取扱販売店



# ゴミヘル・経費削減装置

## 感染性廃棄物(固形物)処理段ボール容器用ホルダー

およそ**30%**  
収納力アップ!<sup>※1</sup>



### ● 特長

- ・この段ボール容器用ホルダーは、ゴミ箱内の空気溜りを少なくして、効率良くゴミを処理する事によりコスト削減が出来ます。
- ・手を使わずに、左右の足踏みペダルのみで、上部フタの開閉からゴミの押し込みまで操作できます。
- ・安全で衛生的、操作も簡単です。

### ● 経費削減装置の説明

ゴミ箱内がゴミで満杯になると、足踏みペダル(左側)を踏んで、フタを閉め、さらに踏み込んで中フタを下げます。

中フタが下がる事によりゴミは下へ押し込まれ、空気層が減り、ゴミがより多く入ようになります。ゴミ箱の数量、取替回数、運搬回数、その他多くの削減が可能です。

### ● 耐久性<sup>※2</sup> は大病院にて6年以上故障無しであります。

ステンレス、亜鉛鋼板、軸受メタル使用

※1. 捨てるゴミにより、パーセンテージは変動します。

※2. 水洗いは、サビの原因になりますのでしないでください。

## 操作手順

### 1. 段ボール容器用ホルダー



右側ペダルを踏みフタを開けます。

### 2. セット完了



セット



正しく段ボール箱がセットされている事を確認します。

### 3.



ゴミを入れます。

### 4.



左側ペダルを踏みフタを閉めます。

### 5.



よりさらに踏み込み、ゴミを圧縮します。圧縮した状態でロックできます。



フタが汚れるようでしたら、ペーパーウエスをゴミの上被せてご使用下さい。

### 6.



右側ペダルを踏むと自動的にロックを解除してフタが開きます。

### 7.



ゴミ圧縮完了です。さらにゴミが入られます。

- ゴミヘル寸法 / W×H×D 約 510×930×400mm
- ゴミヘル重量 / 約 24kg
- 使用ダンボール箱寸法 / W×H×D 約 410×505×250mm



注意：ホルダーよりゴミ箱を取り出す際、ゴミに触れないよう作業して下さい。

※ 付属品(別売)ビニール袋付専用段ボール箱、ゴミ目隠し用ペーパーウエス、取扱いております。