

どこでも自在な車イス

特許出願中

らくらくウィルチくん

らくらくウィルチくんの名前の由来

Wheel chair (ウィールチェア) は車椅子を意味します。楽にどの方向にも移動出来ることから、らくらくウィルチと名付けました。

左ナナメ
前方にも

前方にも

右ナナメ
前方にも

左にも

ひと

右にも

ペダル1踏で
全方向移動段差もOK

左ナナメ
後方にも

後方にも

右ナナメ
後方にも

こんな車イス見たことない!!
ストレスフリーでどこでも移動

だん差があってもらくらく移動



全方位移動ユニット「らくらくウィルチくん」を装着すれば あなたの車椅子が真横に移動!!

横移動だけでなく全方向に自在に動きます。

基本情報

- 重量(本体) 3.5Kg
- 使用耐荷重 70Kg用、100Kg用
- 使用材質 アルミ、ステンレス、メッキ鋼板
- 寸法 W×H×D 約 (420×230×530)
◇ ×340×360

◎オーダーメイド可

自在車輪ユニット

- 簡単取付取外し
- 既存の車イスに取り付けて使用
- 色々な車イスに対応(オーダーメイド)

今なら一週間無料で
試用いただけます。
遠慮無く連絡ください。
(裏面参照)

(福知山市・綾部市・舞鶴市・
丹波市の方など)

TEL : 0773-27-7301

お持ちの車椅子に「らくらくウィルチくん」を装着すると、介護者がペダルをひと踏みするだけで、後輪が入れ替わり全方向への移動が可能になります。
方向転換もスムーズです。

使用方法



車イスに適合するユニットをノブで
取付



ペダルを踏むと自在キャスターが降り、後部大車輪を持ち上げます。更に踏むとロックされます。解除は横のペダルを踏みます。



尚、乗者の方が使用の時は付属のパイプレバーを取り付けてレバーを上持ち上げてロックします。解除はレバーを左に傾けて下さい。



くれぐれも使用方法を熟知され、怪我の無い様に
お願いします

らくらく段差の乗り超え

介護者編



①段差の所まで来たら



②ペダルを踏みます



③らくに浮き上がります




④段差の所まで前輪をもって
いきます



⑤段差に前輪が乗ったらペダル
から足をおろします



⑥段差を乗り越えました

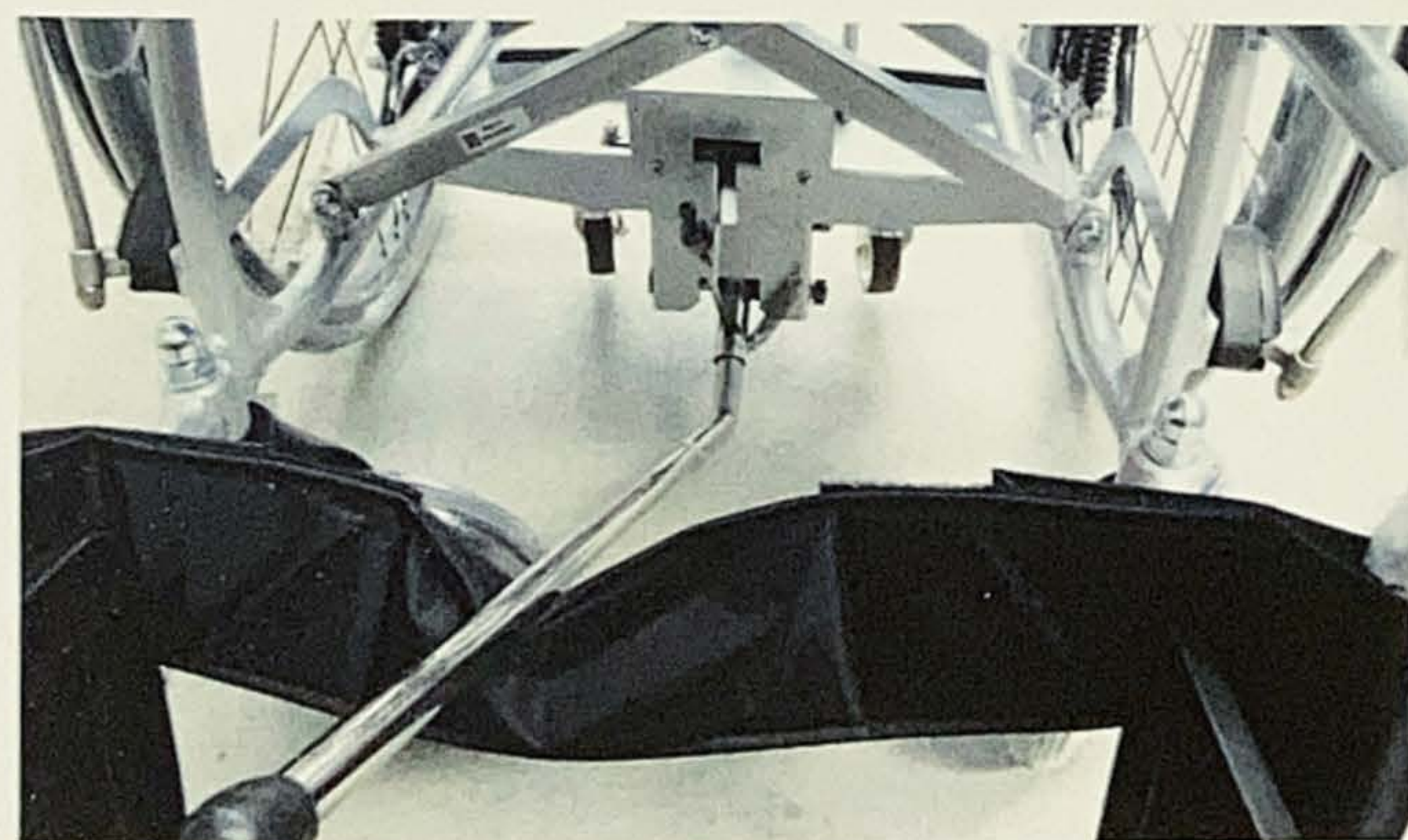

乗者編

レバーで乗車の方もOK

※乗車用レバーは取りはずし可

らくらく自在移動

介護者編



①ペダルを踏み
自在キャスターを下げる



②車イスの大車輪が浮き
移動



③横ペダルを踏み解除



④ペダル収納